

Instruction pour le traitement et l'entretien optimal de l'instrumentation


DEVE
FRANCE

La précision au bout des doigts

ATTENTION

- Le traitement et l'entretien de l'instrumentation est uniquement autorisé au personnel spécialement qualifié et ayant une formation spéciale dans ce domaine.
- **Les instruments sont livrés non stériles/non-propres**
▶ Ils doivent subir un traitement complet avant la première utilisation
- Pour le nettoyage, les instruments fragiles doivent être placés dans des cassettes, ou autres dispositifs spéciaux.
- Lors du maniement et nettoyage avec des instruments contaminés/souillés, il est important de porter des gants de protection.
- La longévité des instruments médicaux dépend de la fréquence de leur utilisation et du soin de son utilisateur.
- Les concentrations, températures, durées d'action ainsi que les indications de rinçage fournies par le fabricant de détergent et désinfectant doivent être respectées.

! **Les instruments contaminés peuvent être vecteurs de maladie!**

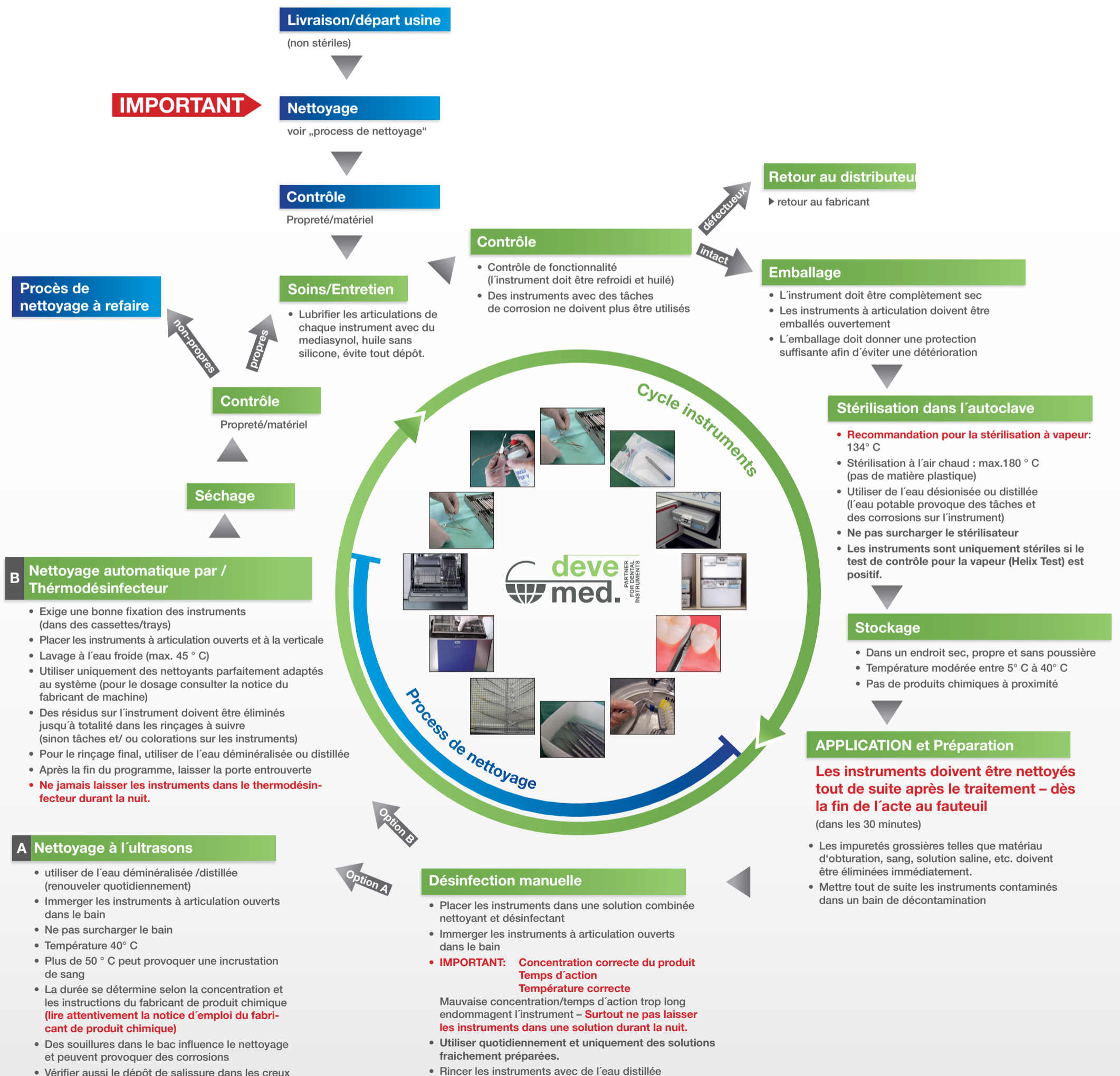

▼ Rincer

▼ Sécher